



RIDDER | *Assistent*

★★★★★ PREMIUM



Geprüft nach
DIN EN ISO 11199-2



MEDIZINPRODUKT

RO

Manual de utilizare

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE PENTRU ROLLATOR EXTERIOR RIDDER A0300100

Draga client,

Iti multumim pentru alegerea produsului nostru! Te rugam sa citesti cu atentie instructiunile de siguranta inainte de utilizare si sa pastrezi manualul pentru utilizarea ulterioara.

Producatorul nu raspunde pentru asamblarea defectuasa sau utilizarea necorespunzatoare a produsului.

CONTINUTUL PACHETULUI:



1x Cadru rollator premontat



810 - 940 mm
31.9 - 37 inch






1x Geanta pentru cumparaturi











Capacitate: 13L, maxim 5 Kg



1x Manual de utilizare



 ATENȚIE!	Atentie, pericol! Nerespectarea acestui pericol poate avea ca rezultat deces sau vatamari grave.
 PRECAUTIE!	Atentie, pericol! Nerespectarea acestui pericol poate duce la leziuni minore sau moderate.
 NOTA!	Avertizare asupra eventualelor pagube materiale

	Inaltimea minima si maxima a cadrului de mers
	Latimea maxima a cadrului de mers
	Greutatea maxima a utilizatorului
	Se poate utiliza atat in spatiile exterioare, cat si in cele interioare
	Cititi cu atentie manualul de utilizare
	Companie distribuitoare
	Data fabricatiei
	Declaratie de conformitate CE
	Produs medical
	Avertisment impotriva ranirii mainilor

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA / CURATARE SI INGRIJIRE

NOTA!

Nerespectarea acestor avertismente poate duce la vatamari corporale. NU instalati si nu utilizati acest produs

inainte de a citi și a înțelege aceasta fișa de instructiuni. Daca nu puteti înțelege avertismentele, precautiile sau instructiunile, contactati un profesionist din domeniul sanatatii sau un tehnician personal inainte de a incerca sa instalati acest echipament - altfel, va puteti rani sau pot aparea diverse daune. Ar trebui sa va consultati intotdeauna cu medicul sau terapeutul Dumneavoastra pentru a determina reglarea si utilizarea corespunzatoare.

Cadrul de mers, care poate fi utilizat in interior si in exterior, a fost dezvoltat ca un mijloc de mers pentru persoanele cu deficiente locomotorii. Poate fi folosit și ca scaun.

Durata maxima de viata recomandata este de pana la 5 ani. In acest sens, consideratia instructiunilor de utilizare, siguranta si ingrijire prevazute sunt conditii obligatorii.

ATENTIE!

- Cadrul de mers NU este indicat sa fie autopropulsat in timp ce este instalat.
- Verificati intotdeauna daca tubul scaunului este blocat si conectat corespunzator la cadru atunci cand cadrul de mers este deschis.
- Testati intotdeauna frana dupa fiecare reglare a inaltimii pentru a evita o flexie libera a cablului.
- Verificati intotdeauna daca ambele sine de prindere sunt fixate la aceeasi inaltime si butoanele de prindere pentru reglarea inaltimii manerului sunt fixate corect (butoanele trebuie sa fie in exterior).
- Toate rotile TREBUIE sa fie in contact COMPLET cu podeaua in timpul utilizarii. Acest lucru va asigura echilibrul corespunzator pentru cadrul de mers.
- A nu se utiliza in caz de deteriorare.

NOTA!

Curatare si ingrijire:

Va rugam sa urmati instructiunile de curatare si ingrijire. Utilizarea necorespunzatoare poate deteriora produsul.

Curatati usor cadrul de mers cu apa si cu un produs de curatare comercial.

Apoi uscati produsul cu o carpa.

Asadar, nu folositi produse de curatare agresive si evitati intotdeauna expunerea cadrului de mers la apa dura, jeturi (cum ar fi produsele de curatat de inalta presiune), altfel partile mici sau suprafata pot fi deteriorate.

i NOTA!

Important: Verificati toate partile ce pot fi deteriorate la transport. In cazul posibilelor daune de expediere, NU folositi produsul, contactati distribuitorul pentru mai multe detalii si instructiuni.



i NOTA!

Avertismente de stabilitate:



Cadrul de mers poate oferi asistenta ambulatorie unei persoane cantarind pana la 136 kg (300 lbs), INCLUSIV incarcarea gentii pentru cumparaturi.

Geanta are o limitare de greutate de 5 kg (11 lbs).












ATENȚIE !

Pericol de ranire prin prinderea
mainilor!

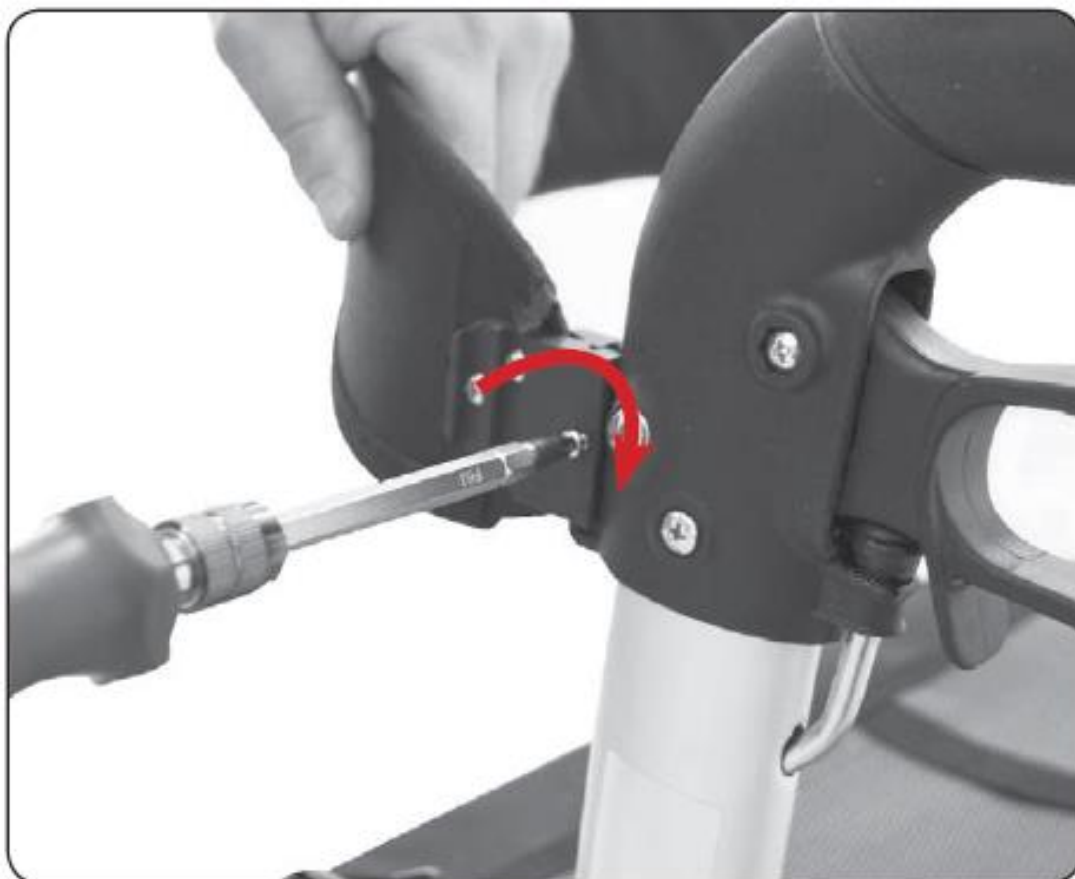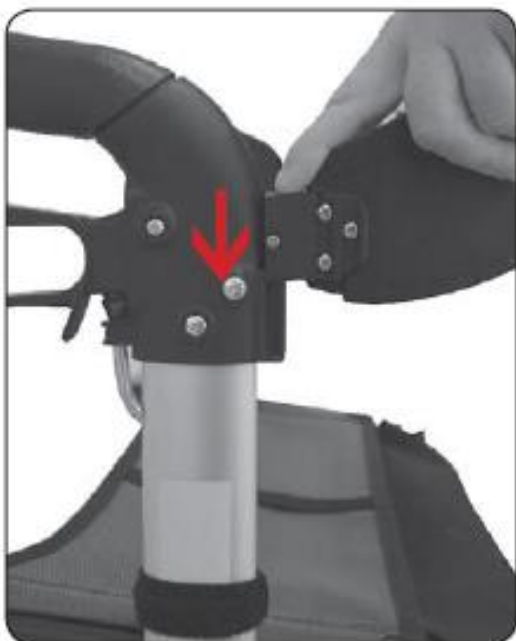


ASAMBLAREA:

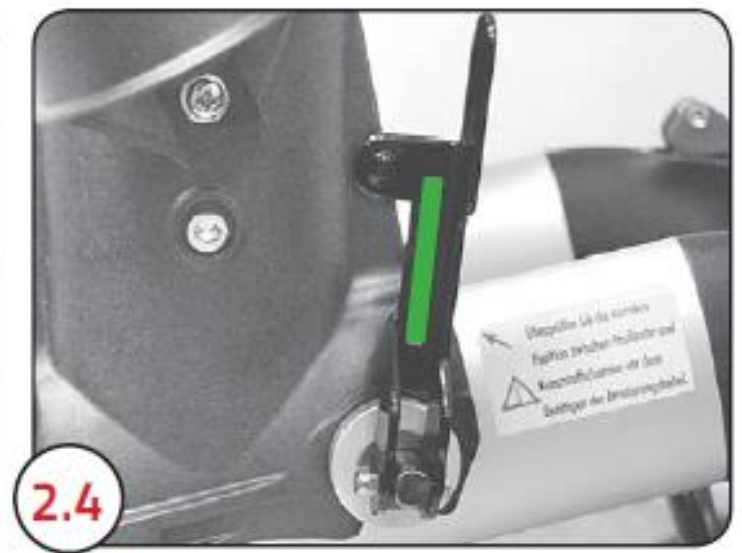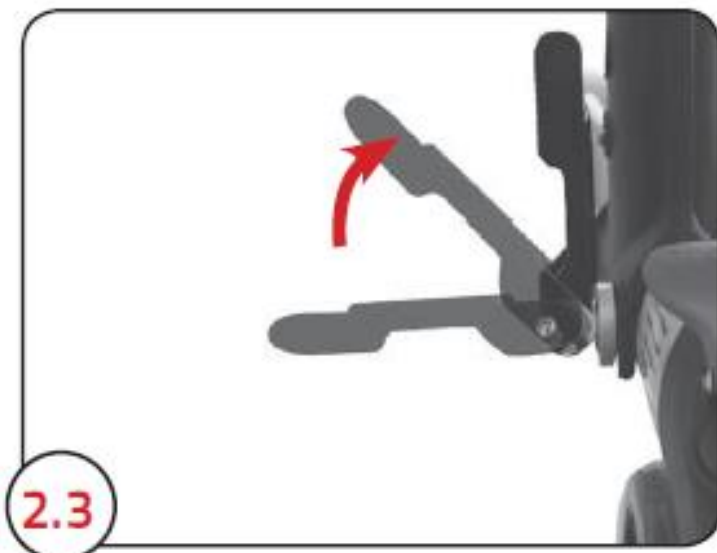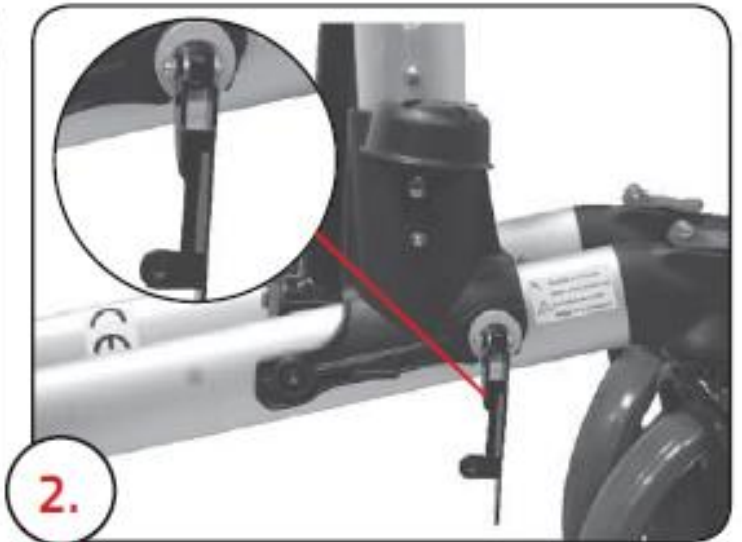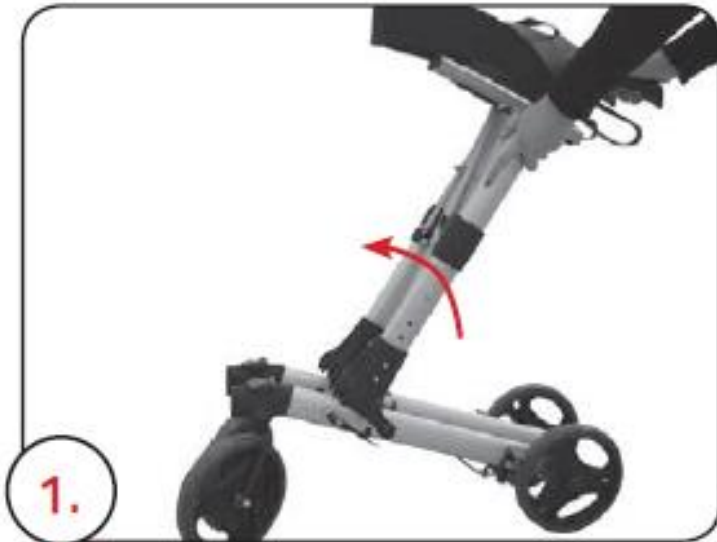

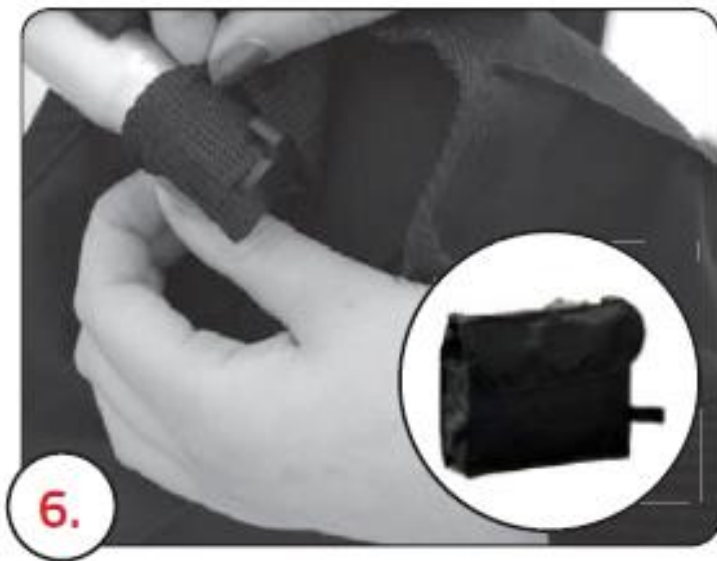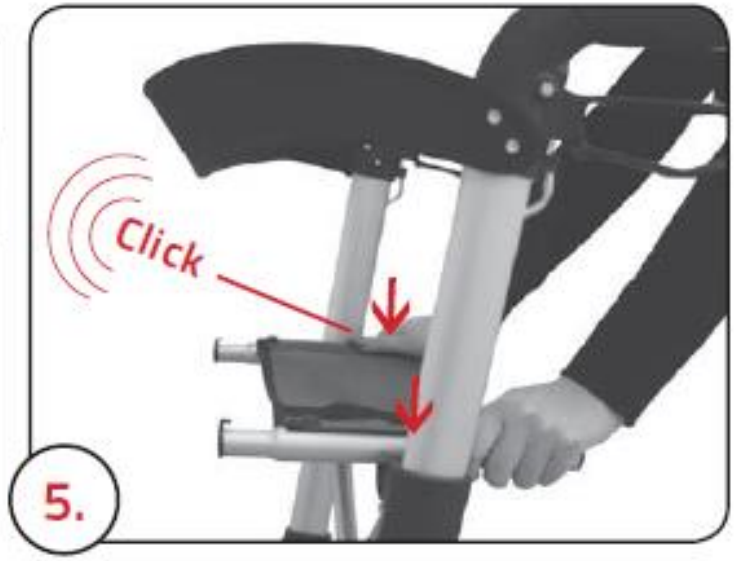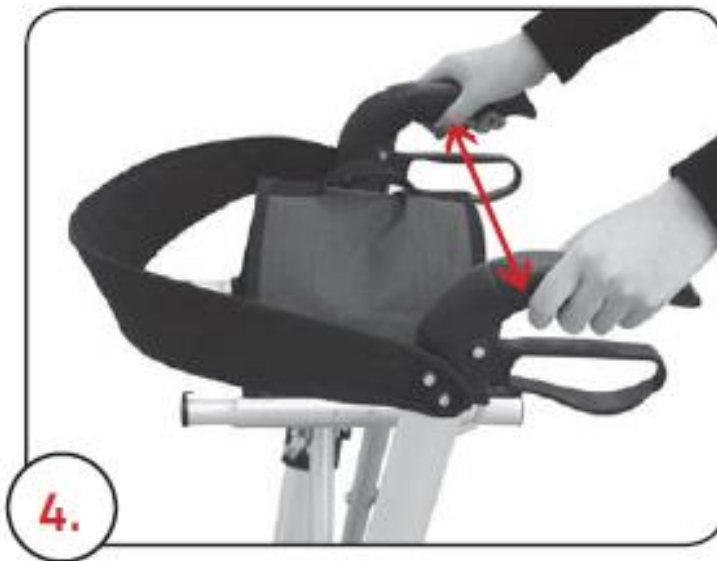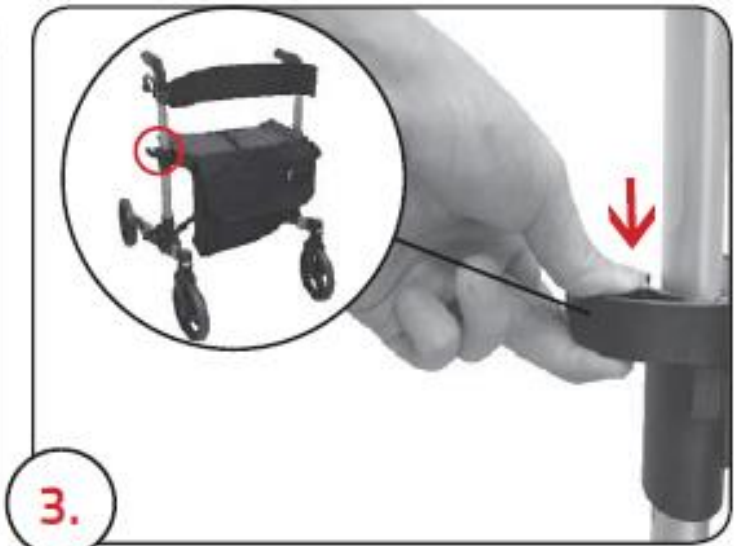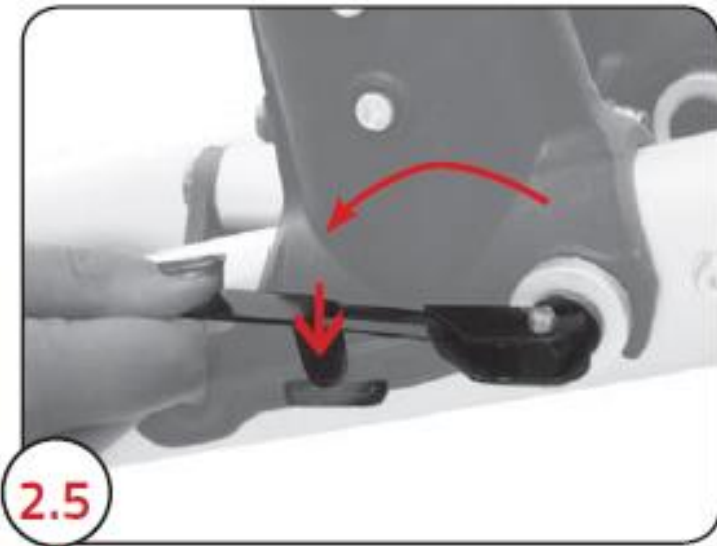

UTILIZAREA:

Plierea

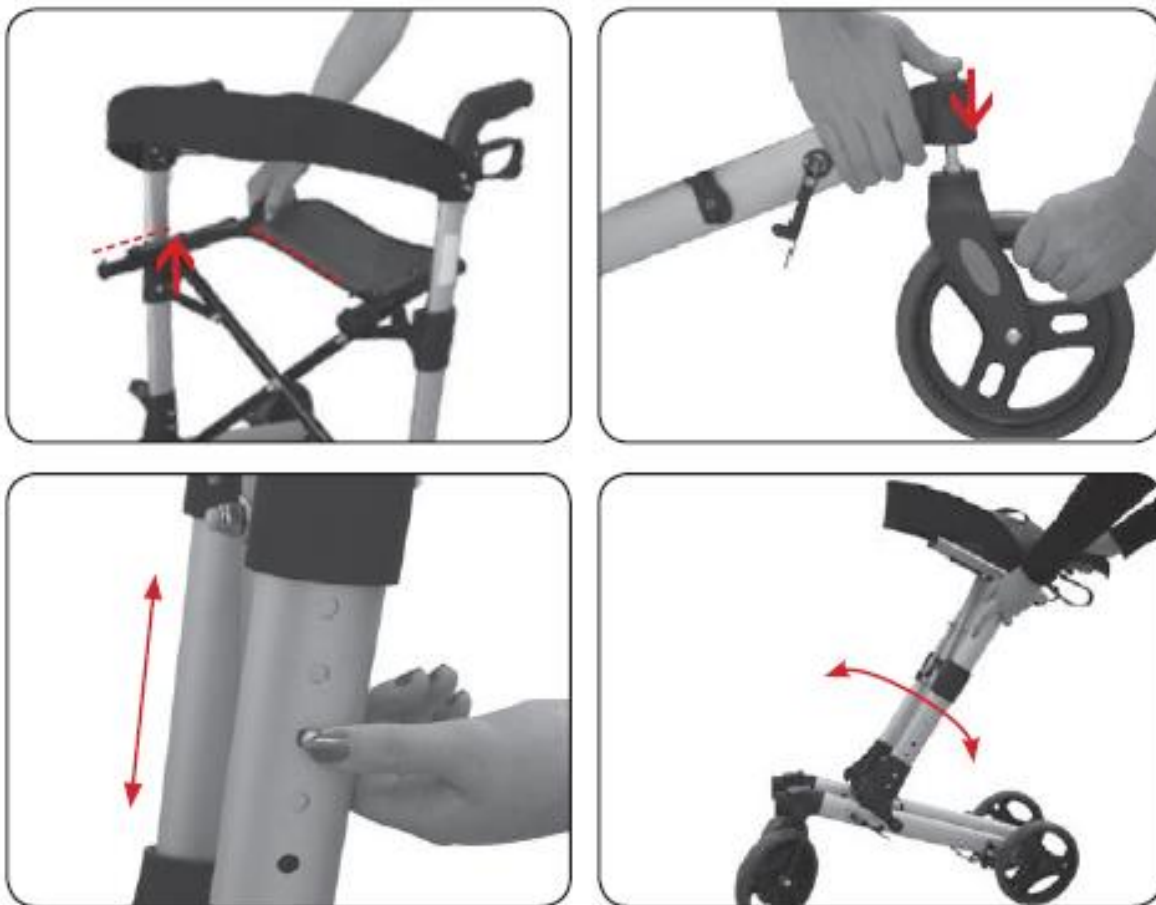

Utilizarea franelor



ATENTIE!

Va rugam sa verificati franele pentru reglarea si functionalitatea corecta inainte de fiecare utilizare.
Inainte de a utiliza scaunul, frana TREBUIE sa fie activata.