



**RIDDER**

*Assistent*

★ ★ ★ ★ ★ COMFORT



**INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE SI ASAMBLARE  
SCAUN AUXILIAR PENTRU BAIE AJUSTABIL  
A0102601**



## **NOTA!**

Stimate client,

Te rugam sa citesti cu atentie instructiunile de siguranta inainte de utilizare si sa pastrezi manualul pentru utilizarea in continuare.

Producatorul nu isi asuma raspunderea pentru asamblarea defectuoasa sau utilizarea necorespunzatoare a produsului.

### **Instructiuni de siguranta:**

Acest produs este conceput pentru folosirea in spatii cu umiditate ridicate.

Se poate depozita numai in momentul desasamblarii picioarelor.

Inainte de fiecare utilizare, verificati reglarea inaltimii a scaunului.

Toate picioarele trebuie sa fie deasupra punctelor de contact.

Picioarele trebuie sa se aseze pe pardoseala in toate cele 4 punct de contact.

Pastrati materialele de ambalare departe de copii.

Suprafetele umede pot afecta functia antiderapanta.

Certificatul nu contine teste pentru utilizarea persoanelor / pacientilor aflati in reabilitare sau sectoarele de ingrijire medicala.

Utilizarea maxima recomandata este de 5 ani. Nu utilizati produsul daca este deteriorat.


### **Instructiuni de curatare si ingrijire:**

Va rugam sa acordati atentie instructiunilor de curatare si ingrijire.


In cazul utilizarii necorespunzatoare, produsul poate fi deteriorat.

Curatati cu grija cu apa si detergenti comerciali obisnuiti. Ulterior, puteti usca produsul cu o carpa.

## CONTINUTUL PACHETULUI:

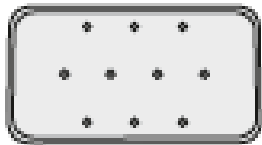

1x

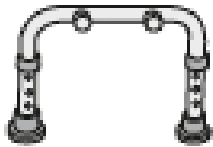

2x



2x



A

4x




B

2x



6x

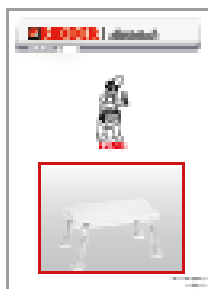

1x

# ASAMBLAREA:

