



RIDDER

Assistent

★ ★ ★ ★ ★ COMFORT



**INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE
CAPAC WC INALTATOR CU MANERE
A0072001**



NOTA!

Stimate client,

Te rugam sa citesti cu atentie instructiunile de siguranta inainte de utilizare si sa pastrezi manualul pentru utilizarea in continuare.

Producatorul nu isi asuma raspunderea pentru asamblarea defectuoasa sau utilizarea necorespunzatoare a produsului.

Instructiuni de siguranta:

Acest produs este conceput pentru aplicarea pe vasul de toaleta si serveste doar ca suport pentru toaleta.

Inainte de fiecare utilizare, verificati daca produsul este montat in siguranta.

Certificatul nu contine teste pentru utilizarea persoanelor / pacietilor care se afla in sectoarele de reabilitare sau de ingrijire medicala.

Nu va ridicat in picioare pe scaun.

Pastrati materialele de ambalare departe de copii.

Suprafetele umede pot afecta functia antiderapanta.

Nu este adecvat pentru utilizarea de catre copii.

Utilizarea maxima recomandata este 5 ani.

Nu utilizati produsul daca este deteriorat.

Instructiuni de curatare si ingrijire:

Va rugam sa acordati atentie instructiunilor de curatare și ingrijire.


In cazul utilizarii necorespunzatoare, produsul poate fi deteriorat.

Curatati-l cu apa si detergenti obisnuiti din comert. Ulterior, puteti usca produsul cu o carpa.

CONTINUTUL PACHETULUI:



1x

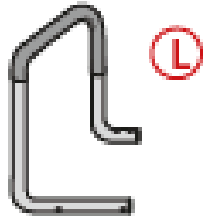

1x



1x



3x



3x



1x



1x



2x



8x



1x



VARIANTE:



1x



1x

ASAMBLAREA:

