



RIDDER | *Assistent*

★ ★ ★ ★ ★ COMFORT



**INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE
SCAUN BAIE AUXILIAR CU DOUA TREPTE
A0102001**



NOTA!

Stimate client,

Te rugam sa citesti cu atentie instructiunile de siguranta inainte de utilizare si sa pastrezi manualul pentru utilizarea in continuare.

Producatorul nu isi asuma raspunderea pentru asamblarea defectuoasa sau utilizarea necorespunzatoare a produsului.

Instructiuni de siguranta:

Acest produs este conceput pentru a fi folosit in incaperi umede si poate fi depozitat doar atunci picioarele sunt demontate.

Picioarele trebuie sa se sprijine pe toate cele 6 puncte de sprijin.

Nu lasati materialele de ambalare la indemana copiilor.

Suprafetele umede pot afecta functia antiderapanta. Certificatul nu contine teste pentru utilizarea persoanelor / pacientilor aflati in sectoare de reabilitare sau ingrijire medicala.

Utilizarea maxima recomandata este de 5 ani.

Nu utilizati produsul daca este deteriorat.


Instructiuni de curatare si ingrijire:

Va rugam sa acordati atentie instructiunilor de curatare și ingrijire.


In cazul utilizarii necorespunzatoare, produsul poate fi deteriorat.

Curatati-l cu apa si detergenti obisnuiti din comert. Ulterior, puteti usca produsul cu o carpa.


CONTINUTUL PACHETULUI:

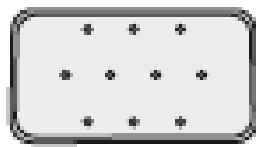

2x

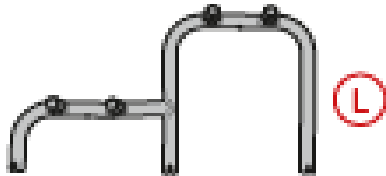

1x

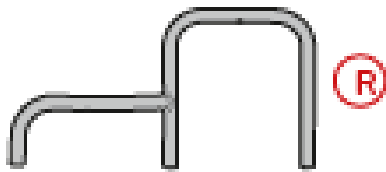

1x



4x



6x




8x



4x



12x

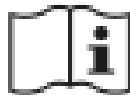

1x

ASAMBLAREA:

