



MEDISEPT

Perfect disinfection



Velox® Spray neutral

Spray pentru curățarea și dezinfectarea suprafețelor

Lichid pentru dezinfectarea rapidă a unor zone mici din industria medicală, saloane de fitness și spa, saloane de coafură, saloane de masaj și frumusețe, grădinițe și școli.

Caracteristicile produsului:

- Pentru dezinfectarea suprafețelor mici ale echipamentelor medicale: paturi și scaune de tratament, echipamente medicale și chirurgicale, aparaturi de recuperare fizică.
- Potrivit pentru dezinfectarea suprafețelor, cum ar fi blaturile de lucru, mesele, mânerul, echipamentele și accesoriile cosmetice.
- Activ în doar 15 sec. împotriva levurilor și în 30 sec. împotriva bacteriilor, tuberculozei și virusurilor (inclusiv rotavirus, norovirus).
- Nu lasă dăre sau pete.
- Recomandat în special pentru sticlă și suprafețe lucioase.

Beneficiile utilizatorului:

- Eficacitate garantată și siguranță la utilizare.
- Reducerea semnificativă a riscului de infecție.
- Efect rapid de curățenie și dezinfecție.
- Poate fi folosit pe multe materiale.



Spray



Dispozitive
medicale
neinvazive



Accesorii
cosmetice



Miros neutru

Velox® Spray neutral

Mod de aplicare:

Lichid pentru dezinfectarea rapidă a unor zone mici din industria medicală, saloane de fitness și spa, saloane de coafură, saloane de masaj și frumusețe, grădinițe și școli. Potrivit pentru dezinfectarea suprafețelor, cum ar fi blaturile de lucru, mesele, mânerul, echipamentele și accesoriile cosmetice și dispozitivele medicale neinvazive, cum ar fi scaunele de tratament, echipamentele medicale și de reabilitare. Este, de asemenea, recomandat pentru dezinfectarea pieselor dentare înainte de sterilizarea lor, precum și pentru tăvile de imprimare dentară și impresiile dentare din silicon. Produsul demonstrează efect bactericid, levuricid, tuberculocid și virucid limitat (împotriva virusurilor Rota și Noro), precum și efect virucid împotriva virusurilor încapsulate (inclusiv Vaccinia, HIV, HBV, HCV).

| Eficacitate | EN 14885 | Condiții | |
|---|----------|-----------|----------|
| | | curățenie | murdărie |
| Bacterii (inclusiv MRSA) | EN 13727 | 30 sec. | 30 sec. |
| | EN 16615 | 30 sec. | 30 sec. |
| Levuri (C. albicans) | EN 13624 | 15 sec. | 15 sec. |
| | EN 16615 | 30 sec. | 30 sec. |
| Mycobacterium tuberculosis (M. terrae) | EN 14348 | 30 sec. | 30 sec. |
| Virusuri încapsulate (Vaccinia, HIV, HBV, HCV, Herpes simplex, Ebola) | EN 14476 | 30 sec. | 60 sec. |
| BVDV | EN 14476 | 30 sec. | 30 sec. |
| Rotavirus | EN 14476 | 30 sec. | 60 sec. |
| Norovirus | EN 14476 | 30 sec. | 30 sec. |

Mod de utilizare:

Pulverizați suprafața de la o distanță de aproximativ 30 cm, asigurându-vă că suprafața este complet acoperită. Așteptați 30 de secunde. Nu necesită clătire cu apă. Produsul este destinat utilizării profesionale.

Ingrediente: substanțe active în 100 g produs:

63,7 g etanol, 6,3 g propan-2-ol.

Unități de ambalare:

Flacon de 1 l bidon de 5 l



Producător: MEDISEPT Sp. z o.o. Polonia

CE 2274



Distribuitor autorizat

S.C. Remix Com S.R.L.

Str. Cpt. Ion Gârbea nr. 26, bloc Lama, sc. B, et. 1, ap. 12, sector 5, București;

Tel/Fax: 021/313.77.88; E-mail: office@remixcom.ro

Revizuire: 02.2020