

Instrucțiuni de folosire sterilizator Spark

Conținut:

1. Instrucțiuni
2. Prezentare
3. Explicații despre aparat
4. Ghid de utilizare
5. Întreținere
6. Rezolvarea problemelor
7. Date tehnice

ATENȚIE

Citiți cu atenție toate instrucțiunile din prezentul manual pentru instalarea, utilizarea și întreținerea corectă și sigură a aparatului.

Păstrați manualul pe durata de utilizarea a aparatului.

Acest produs este în conformitate cu directiva EU 2002/96/EC. Simbolul de coș de gunoi barbat de pe produs indică că acest produs după sfârșitul perioadei de utilizare trebuie tratat separat de deșeurile menajere. Trebuie predat la un centru de desfacere de aparate electrice și electronice (WEEE) sau returnat la vânzător în cazul achiziționării unui alt aparat. Utilizatorul este responsabil pentru predarea produsului pentru desfacere corectă. Predarea corectă a aparatului ajută desfacerea, reciclarea și gestionarea corectă a deșeurilor. Această strategie poate elimina posibilele efecte negative asupra mediului înconjurător și favorizează reciclarea anumitor componente ale produsului. Pentru alte detalii vă rugăm să contactați cel mai apropiat centru de colectare.

1. Instrucțiuni

Citiți cu atenție toate instrucțiunile din prezentul manual pentru instalarea, utilizarea și întreținerea corectă și sigură a aparatului. După despachetarea aparatului asigurați-vă că toate componentele sunt prezente și întregi.. Păstrați manualul pe durata de utilizare a aparatului într-un loc ferit, acesta poate fi folosit pentru referință ulterioară, inclusiv pentru scoaterea din funcțiune a aparatului.

Materialele folosite pentru ambalare, cum sunt: pungile, polystyrenul, cartonul, etc. pot fi reciclate și nu trebuie lăsate la îndemâna copiilor pentru care pot fi periculoase. Nu aruncați ambalajul.

ATENȚIE

Înainte de conectarea aparatului la rețeaua electrică asigurați-vă că datele înscrise pe plăcuța de pe partea posterioară a aparatului corespund cu parametrii rețelei electrice.

Dacă ștecherul aparatului nu este compatibil cu priza, acesta trebuie înlocuit de o persoană autorizată. Dacă cablul este înlocuit trebuie verificat ca diametrul acestuia să fie corespunzător puterii aparatului. Nu este recomandată utilizarea adaptoarelor sau extensiilor. Dacă este strict necesară utilizarea adaptoarelor sau extensiilor asigurați-vă că folosiți doar adaptoare sau extensii conform reglementărilor în vigoare și că capacitatea acestora este conform puterii curentului electric.

ATENȚIE

Aparatul trebuie utilizat exclusiv pentru scopurile pentru care a fost conceput (vezi paragraful 2). Orice alt tip de utilizare este impropriu și periculos. Producătorul nu își asumă răspundere pentru daunele sau leziunile cauzate de utilizarea improprie, greșită sau nerezonabilă a aparatului.

Utilizarea oricărui aparat electric implică respectarea câtorva reguli fundamentale:

1. Nu atingeți aparatul cu mâinile umede.
2. Nu folosiți aparatul când aveți picioarele goale.
3. Nu folosiți aparatul în baie sau în apropierea recipientelor cu lichide.
4. Fiți foarte prudent când folosiți aparatul cu prelungitor în baie sau în apropierea recipientelor cu lichide.
5. Nu trageți de cablul aparatului când îndepărtați ștecherul din priză.
6. Nu expuneți aparatul agenților atmosferici (ploaie, soare, etc.)
7. Nu lăsați aparatul nesupravegheat în apropierea copiilor sau persoanelor cu handicap.

Înainte de transportare, curățare sau întreținere scoateți aparatul din priză. Când curățați părțile exterioare ale aparatului, nu folosiți detergenți deoarece aceștia pot penetra în interiorul aparatului. Este recomandată curățarea cu un prosop umezit cu apă sau cu alcool denaturat.

În cazul opriri aparatului sau a funcționării necorespunzătoare a acestuia, opriți aparatul imediat. Dacă este necesară repararea aparatului, adresați-vă unei persoane autorizate și solicitați folosirea pieselor de schimb originale.

Demontarea aparatului de către persoane neautorizate este interzisă.

După ce decideți să nu mai utilizați aparatul, procedați după cum urmează:

1. Deconectați aparatul de la rețeaua electrică
2. Tăiați cablul de alimentare

Nu folosiți echipamentul cu cablul de alimentare tensionat deoarece poate fi periculos. Nu lăsați aparatul conectat la rețeaua electrică dacă nu este necesar. Deconectați aparatul după fiecare utilizare.

Pentru prevenirea supraîncălzirii, este recomandată desfacerea cablului de alimentare al aparatului. Nu blocați orificiile de aerisire și ventilație.


Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit imediat.

2. Prezentare

Sterilizatorul mod. 619 a fost construit și asamblat din materiale și cu o procedură certificată și controlată. Acest aparat a fost conceput pentru sterilizarea ustensilelor și trebuie utilizat exclusiv pentru acest scop.

3. Explicații despre aparat

Latime: 42 cm
Adancime: 27.5 cm
Inaltime: 28 cm

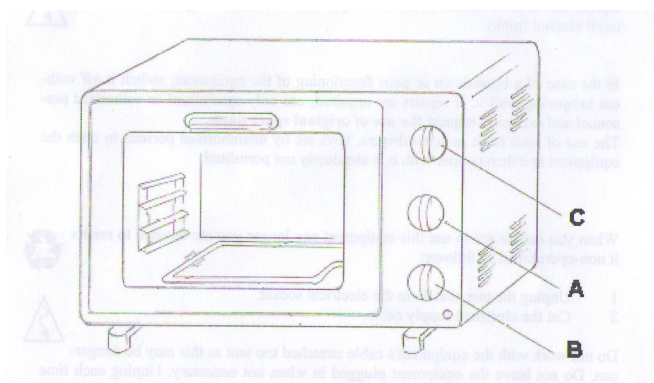

A	COMUTATOR
B	TIMER
C	TERMOSTAT

4. Ghid de utilizare

ATENȚIE

Verificați ca tensiunea electrică să fie corespunzătoare cu cea înscrisă pe eticheta de pe partea posterioară a aparatului.

1. Verificați ca comutatorul A să fie în poziția OFF
2. Porniți sterilizatorul cu ajutorul comutatorului A.
3. Reglați temperatura de sterilizare cu ajutorul butonului C.
4. Reglați timpul de acționare cu ajutorul butonului B.

Temperaturi recomandate:

Pentru sterilizarea obiectelor metalice cum sunt: foarfeci, lame, briciuri, etc. vă recomandăm temperatura minimă de 110°C.

Temperatura poate crește în funcție de tipul și calitatea ustensilelor metalice. Este foarte important ca această temperatură să nu fie mai mică de 110°C.

Nu sterilizați obiecte plastice deoarece acestea se pot topi.

Temperatura maximă de sterilizare este de 250°C.

5. Întreținere

Acest aparat nu necesită întreținere specială, recomandăm curățarea lui de praf. Această operație nu necesită persoană specializată, dar înainte de curățare scoateți aparatul din priză.

6. Rezolvarea problemelor

Dacă aparatul nu pornește de la comutatorul A verificați ca aparatul să fie bine conectat la rețeaua electrică.

În caz de funcționare necorespunzătoare, contactați un tehnician.

7. Date tehnice

VEZI PARTEA POSTERIOARĂ A APARATULUI