

Dezinfectare

hygienicDES CAPS

Dezinfectant concentrat pulbere



Denumire produs: *hygienicDES CAPS*

Domeniu produs: *Dezinfectare*

Descriere produs:

Dezinfectant concentrat pulbere extrem de eficient cu spectru de acțiune complet. Unități de dozare separate în folie solubilă în apă pentru dozarea practică, fără praf și sigură cu STICLA de sistem HAGLEITNER. Folia se dizolvă în apă și este 100% fără microplastic. Datorită timpului de acționare scurt la o dozare economicoasă este optim pentru dezinfecția zilnică de rutină a suprafețelor de orice fel. Perfect adecvat pentru dezinfectarea în caz de infecții organice puternice, de ex. cu norovirusuri, rotavirusuri și *Clostridium difficile*. Nu conține aldehyde și fenoli, de aceea este inodor și deosebit de comod în utilizare.

Unitate de ambalare:

400 g doză (80 x 5 g)

Cod art. 4460101333

Substanță activă:


Acid peracetic (0,5%)

valoare PH:

alcalină

Folosire | Domenii de utilizare:

Dezinfectant pentru suprafețe cu efect extraordinar de curățare și spectru larg de acțiune. Eficient împotriva bacteriilor, a bacteriilor cu spori, microbacteriilor, drojdiilor, ciupercilor și virusurilor (inclusiv virusurile transmisibile prin sânge precum HBV, HCV, HIV, precum și virusurile gripale și norovirusurile). Certificat conform criteriilor VAH/ÖGHMP/RKI și înscris pentru listare. Testat complet conform celor mai noi standarde UE: EN 13697 (bactericid, levurocid, fungicid), EN 13727 (bactericid), EN 16615 (test 4 câmpuri), EN 13624 (fungicid, levurocid), EN 14348 (mucobactericid), EN 17126 și EN 13704 (sporocid), EN 14476 (virucid). Aplicați soluția uniform pe suprafața de curățat și mențineți-o umedă pe durata de acționare. După utilizare clătiți cu apă de la chiuvetă. Indicație specială: Nu puneți mâna umedă în doză!

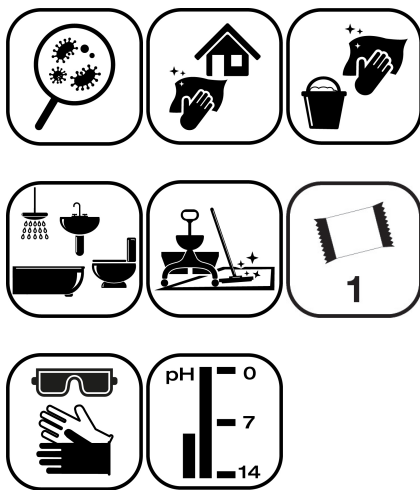



hygienicDES CAPS

Dezinfectant concentrat pulbere

Compatibilitatea cu materialele:

Soluția gata de utilizare hygienicDES CAPS a fost testată în privința compatibilității cu următoarele materiale:

ABS (Novodur), POM (Hostaform), PP (Moplen), PP (Novolen), Plexiglas, PVC, ABS, PE-HD (Hostalen), PA, Polisulfon, Teflon, pardoseală de linoleum, pardoseală de cauciuc, pardoseală de vinil, oțel (inox).

La utilizarea pe aluminiu și pe metale neferoase trebuie verificată în prealabil compatibilitatea pe o suprafață mai puțin vizibilă. O utilizare a soluției pe policarbonat nu este recomandată.

Dozare:

1 hygienicDES CAP per STICLĂ de sistem HAGLEITNER corespunde unei concentrații de 5g/L. Puneți cantitatea necesară de hygienicDES CAPS (conform tabelului de dozare) într-o STICLĂ de sistem de 1 litru și umpleți-o apoi cu apă de la chiuvetă. Agitând de câteva ori stica, capsula se dizolvă în apă și se formează substanța activă acid peracetic. După 15 min., safetyWIPES sau safetyMOPS pot fi înmuiate cu soluția gata de utilizare. Prosoapele pot fi utilizate acum timp de 8 ore.

Tabel dozare hygienicDES CAPS:

Metodă de testare	Expunere	Dozare	Germene	Încărcare
EN 13697	5 min*	1 CAP/L	<i>Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa</i>	ridică
EN 13727	5 min*	1 CAP/L	<i>Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli</i>	ridică



Dezinfectare

hygienicDES CAPS

Dezinfectant concentrat pulbere

EN 16615	5 min*	1 CAP/L	<i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Enterococcus hirae</i> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Candida albicans</i>	ridică
EN 13697	5 min*	1 CAP/L	<i>Enterococcus hirae</i> , <i>Candida albicans</i>	ridică
EN 13624	15 min	2 CAP/L	<i>Candida albicans</i>	ridică
EN 14348	30 min	4 CAP/L	<i>Mycobacterium terrae</i> , <i>Mycobacterium avium</i>	ridică
EN 14348	120 min	2 CAP/L	<i>Mycobacterium terrae</i> , <i>Mycobacterium avium</i>	ridică
EN 17126	15 min	4 CAP/L	<i>Clostridium difficile</i>	ridică
EN 17126	30 min	2 CAP/L	<i>Clostridium difficile</i>	ridică
EN 17126	60 min	1 CAP/L	<i>Clostridium difficile</i>	ridică
EN 13704	20 min	1 CAP/L	<i>Clostridium difficile</i> , <i>Bacillus subtilis</i>	scăzută
EN 14476	5 min*	1 CAP/L	Adenovirus, rotavirusuri, norovirusuri (MNV)	ridică
EN 14476	30 min	2 CAP/L	Poliovirus	ridică
EN 14476	5 min	2 CAP/L	Poliovirus SV40	ridică
EN 14476	15 min	1 CAP/L	Poliovirus SV40	ridică
EN 13697	15 min	4 CAP/L	<i>Aspergillus brasiliensis</i>	ridică
EN 13624	30 min	2 CAP/L	<i>Aspergillus brasiliensis</i>	ridică
EN 16615	60 min	2 CAP/L	<i>Aspergillus brasiliensis</i>	ridică

* pentru dezinfecția de rutină zilnică: 1 CAP/L cu timp de acțiune de 5 minute



hygienicDES CAPS

Dezinfectant concentrat pulbere

Instrucțiuni de siguranță:

Foarte periculos pentru ochi. Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Limpeziți mai departe. Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic. Utilizați dezinfectanții cu grijă. Înainte de folosire, citiți întotdeauna eticheta produsului.

Depozitare:

Temperatura de depozitare recomandată: 5-25 °C. Păstrați recipientul închis etanș și uscat. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Recomandare produs:

Pentru evitarea transmiterii germenilor în soluția dezinfectantă, recomandă utilizarea hygienicDES CAPS în combinație cu Hprodusele AGLEITNER safety: safetyWIPES, safetyMOP, safetyBOX, safetyBOX SMALL. Trebuie neapărat să spălați safetyWIPES înainte de prima utilizare!

Europalet:

288 bucăți

Unitate de vânzare:

Doză